



Сделайте слепок.  
Клинический штифт  
останется в слепке.



Самосмазывающийся  
клинический штифт  
позволяет сделать точный  
оттиск корневого канала.



Выберите прозрачный  
лабораторный штифт того  
же цвета, что и клинический  
штифт.



Обрежьте штифт и разгладьте  
его горячим инструментом,  
создав ретенцию для воска.



Смоделируйте воск,  
запакуйте, поместите в печь.  
Начальная температура  
обжига 250 °С, выдержка  
при данной температуре  
30 мин, затем нагрев согласно  
инструкции по паковочной  
массе.

WWW.CEKA-PRECILINE.COM

SWISS MADE



CEKA REVAX

CEKA SOL

PRECI-HORIX

PRECI-VERTIX

PRECI-VERTIX AT

PRECI-BAR

PRECI-BALL

PRECI-CLIP

PRECI-CLIX EXTRACORONAL

PRECI-CLIX AXIAL

PRECI-CLIX RADICULAR

PRECI-TUBIX/MORTIX

PRECI-POST

PERMA-RET

3C-BOND

EXPANDO

ПРЕЦИ-ПОСТ

ПРЕЦИ-ПОСТ

CEKA  
ATTACHMENTS  
PRECILINE



Проспект № 261.R-ed.B  
Copyright© ALPHADENT NV 2/2008  
BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ALPHADENT NV  
Textielstraat 24  
8790 Waregem, Belgium  
tel +32 56 629 100  
fax +32 56 629 101  
e-mail: info@ceka-preciline.com

Division of ARSEUS  
DENTAL

# СИСТЕМА ПРЕЦИ-ПОСТ М

Конусность 2°30′



## НАБОР 2001

### НАБОР ПРЕЦИ-ПОСТ:

- 1 желтый бор-развертка
- 1 голубой бор-развертка
- 25 клинических штифтов, желтых
- 25 клинических штифтов, голубых
- 25 лабораторных прозрачных штифтов, желтых
- 25 лабораторных прозрачных штифтов, голубых



Подготовьте корневой канал при помощи желтого или голубого бора-развертки.



Остановите вращение, достигнув нужного размера вкладки, и завершите обработку поверхности у границ устья канала.



Выберите клинический штифт из набора того же цвета, что бор-развертка, который Вы использовали.

Ø диаметр	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Длина конуса			10,7 mm	12,3 mm		12,3 mm
Общая длина		14,1 mm	18,6 mm		16,7 mm	22,9 mm
<b>REF</b>						
<b>2001</b>	1 x	25 x	25 x	1 x	25 x	25 x
<b>2002</b>		50 x			50 x	
<b>2002G</b>		50 x				
<b>2002B</b>					50 x	
<b>2003L</b>			50 x			50 x
<b>2003GL</b>			50 x			
<b>2003BL</b>						50 x
<b>2004G</b>	1 x					
<b>2004B</b>				1 x		