

КОМПОНЕНТЫ & АКСЕССУАРЫ



PRECISAGIX ПАТРИЦА P

Отливаемая сферическая пластиковая матрица. Отливается из твердого дентального сплава.

Уменьшенный \varnothing 1,7:

1321 6 шт. # 1321B 50 шт.

Стандартный \varnothing 2,2:

1371 6 шт. # 1371B 50 шт.



PRECISAGIX ПАТРИЦА M

Матрица из сплава NOPRAX** для техники литья недорогими сплавами.

Уменьшенный \varnothing 1,7:

1322 2 шт. # 1322B 20 шт.

Стандартный \varnothing 2,2:

1372 2 шт. # 1372B 20 шт.



PRECISAGIX ПАТРИЦА V

Стандартная матрица из сплава NOPRAX** \varnothing 2,2 мм с резьбой M2 и внутренним пазом 0,9 мм. Используйте отвертку IMP-XS-042.

1373 1 шт.



PRECISAGIX БАЗОВОЕ КОЛЬЦО

Для техники литья из сплава IRAX* (при работе с драгоценными сплавами) или NOPRAX** (при работе с недорогими сплавами). M2 резьба для # 1373 стандартной матрицы \varnothing 2,2 мм

RA 0063 сплав IRAX* 1 шт.

RA 0064 сплав NOPRAX** 1 шт.



PRECISAGIX ДЕРЖАТЕЛЬ ПАТРИЦ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА

Универсальный держатель для матриц PRECISAGIX

1300 P для \varnothing 1,7 и 2,2 1 шт.



PRECISAGIX ОТВЕРТКА ДЛЯ ВКРУЧИВАЮЩИХСЯ ПАТРИЦ

Общая длина: 26 мм – Внешний паз: 0,9 мм

IMP-XS-042 1 шт.



CEKA BOND

Анаэробный адгезив, который предотвращает выкручивание матрицы. Матрицу можно выкрутить, используя отвертку IMP-XS-042.

CB1 5 ml



PRECISAGIX ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Универсальный инструмент для установки матриц PRECISAGIX

1323 для \varnothing 1,7 и 2,2 1 шт.



PLASTICWAX 8° ПРОФИЛИ

Высота: 4,5 мм – Длина: 60 мм

Ширина у верхушки: 1,9 мм / у основания: 2,8 мм

IMP-CK-014 4 шт.



PRECISAGIX АНАЛОГ

Модельный аналог матрицы

1331 для \varnothing 1,7 2 шт.

1381 для \varnothing 2,2 2 шт.

* Сплав IRAX 1400-1460 °C - для техники литья только драгоценными сплавами. Au 60 - Pt 24 - Pd 15 - Ir 1

** Сплав NOPRAX 1355-1450 °C - для техники литья только недорогими сплавами. Ni 72 - Cr 17 - Fe 10 - Mn 1

WWW.CEKA-PRECLINE.COM

SWISS MADE



CEKA
ATTACHMENTS
PRECISAGIX

PRECISAGIX

PRECISAGIX

CEKA REVAX
CEKA SOL
PRECISAGIX
PRECISAGIX
PRECISAGIX AT
PRECISAGIX BAR
PRECISAGIX BALL
PRECISAGIX CLIP
PRECISAGIX
PRECISAGIX AXIAL
PRECISAGIX EXTRACORONAL
PRECISAGIX RADICULAR
PRECISAGIX RADICULAR RC
PRECISAGIX TUBIX/MORTIX
PRECISAGIX POST
PRECISAGIX PROFILE
PERMA-RET
3C-BOND
EXPANDO
CEKA-MAX



Проспект № 287.R-ed.A
Copyright© ALPHADENT NV 1/2010
BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk


ARSEUS DENTAL
SERVING THE DENTAL PROFESSIONALS

ALPHADENT NV
Textielstraat 24
8790 Waregem, Belgium
tel +32 56 629 100
fax +32 56 629 101
e-mail: info@ceka-preciline.com

PRECI-SAGIX

САГИТТАЛЬНЫЙ ШАРИКОВЫЙ АТТАЧМЕН С СЕГМЕНТИРОВАННОЙ МАТРИЦЕЙ ДЛЯ ЧАСТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ И ИМПЛАНТОВ

PATENTED

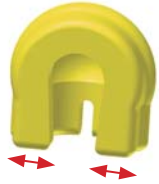

- ✓ Запатентованный защелкивающийся механизм
- ✓ Невысокая цена
- ✓ Широкое применение
- ✓ Простая замена частей
- ✓ Выбор рабочей процедуры
- ✓ Длительная ретенция



1а. Отливаемая пластиковая матрица. Определите оптимальный путь введения. Установите отливаемую пластиковую матрицу (# 1321 или # 1371) в восковую репродукцию протеза, используя держатель для параллелометра (# 1300 P). Рекомендуется укрепление с лингвальной стороны для частичных съемных протезов. Отлейте из твердого стоматологического сплава.



1b. Литая металлическая матрица. Определите оптимальный путь введения. Установите матрицу из сплава NOPRAX** (# 1322 или # 1372) в восковую репродукцию, используя держатель для параллелометра (# 1300 P). Рекомендуется укрепление с лингвальной стороны для частичных съемных протезов. Отлейте из недрагоценного стоматологического сплава.



1с. Вкручивающаяся матрица. Определите оптимальный путь введения. Установите вкручивающуюся матрицу (# 1373, стандартный размер 2,2 мм) в базовое кольцо из сплава IRAX* (# RA 0063 – при литье из драгоценных сплавов) или NOPRAX** (# RA 0064 – при литье из неблагородных сплавов). Используйте отвертку (# IMP-XS-042). Установите в восковую репродукцию, используя держатель для параллелометра (# 1300 P). Выкрутите матрицу. Используйте двухэтапную технику паковки и проведите литье. Балочные профили PLASTICWAX (# IMP-СК-014) также доступны.



2а. Установка матрицы. Всегда используйте розовую дублирующую матрицу для изготовления огнеупорной модели! Поместите розовые дублирующие матрицы на матрицах и проверьте их параллельность. Блокируйте поднутрения, произведите дублирование и отливку из огнеупорного материала.



Отлейте каркас. Обработайте его без повреждения ретенционного выступа в полости для матрицы. Отполируйте до зеркального блеска. Установите розовую рабочую матрицу (# 1316 или # 1366) с помощью ключа (# 1323) в каркас для дальнейшей работы с пластмассой.



Замена рабочей матрицы
Для замены матрицы, используйте остроконечный инструмент для перемещения и удаления. Используйте ключ (# 1323) для установки новой матрицы.
Доступны 3 уровня ретенции:
желтый: нормальная ретенция
белый: сниженная ретенция
красный: повышенная ретенция

НАБОРЫ



PRECI-SAGIX СТАРТОВЫЙ НАБОР P
Стартовый набор с пластиковыми матрицами, необходимыми инструментами и матрицами с различными уровнями ретенции. Матрица отливается из любого твердого стоматологического сплава.
Набор из 22 элементов:
2+2 отливаемые пластиковые матрицы
2+2 желтые матрицы (нормальная ретенция)
2+2 белые матрицы (сниженная ретенция)
2+2 красные матрицы (повышенная ретенция)
2+2 дублирующие/рабочие матрицы
1 универсальный держатель для параллелометра
1 универсальный инструмент для установки
Набор с отливаемыми матрицами: # 1301



PRECI-SAGIX СТАРТОВЫЙ НАБОР M
Стартовый набор с литыми матрицами из сплава NOPRAX**, необходимыми инструментами и матрицами с различными уровнями ретенции в 2-х размерах: Уменьшенный 1.7 и Стандартный 2.2. Для литья из недрагоценных сплавов.
Набор из 22 элементов:
2+2 литые матрицы из сплава NOPRAX**
2+2 желтые матрицы (нормальная ретенция)
2+2 белые матрицы (сниженная ретенция)
2+2 красные матрицы (повышенная ретенция)
2+2 дублирующие/рабочие матрицы
1 универсальный держатель для параллелометра
1 универсальный инструмент для установки
Набор с литыми матрицами: # 1303

PRECI-SAGIX МАТРИЦЫ



PRECI-SAGIX МАТРИЦА – ИЗ ПОЛИАЦЕТАЛЯ
Уменьшенный ø 1,7: высота 3,1 мм – ø 3,1 мм
Желтые – нормальная ретенция:
1311 6 шт. # 1311B 50 шт.
Белые – сниженная ретенция:
1312 6 шт. # 1312B 50 шт.
Красные – повышенная ретенция:
1313 6 шт. # 1313B 50 шт.
Комбинированная упаковка:
1314 2 + 2 + 2 шт.

Стандартный ø 2,2: высота 4,1 мм – ø 4,2 мм
Желтые – нормальная ретенция:
1361 6 шт. # 1361B 50 шт.
Белые – сниженная ретенция:
1362 6 шт. # 1362B 50 шт.
Красные – повышенная ретенция:
1363 6 шт. # 1363B 50 шт.
Комбинированная упаковка:
1364 2 + 2 + 2 шт.

PRECI-SAGIX ДУБЛИРУЮЩАЯ / РАБОЧАЯ МАТРИЦА
Уменьшенный ø 1,7:
1316 6 шт. # 1316B 50 шт.
Стандартный ø 2,2:
1366 6 шт. # 1366B 50 шт.